



*Výjimečná ochrana očí při
neonatální fototerapii*

Velikost: REG-normální
Velikost: PREM-nedonoš.
Velikost: MICRO-mikro

Pouze pro jednorázové použití



<u>obj.č.</u>	<u>název a velikost Biliband čelenky</u>
900642	REG - Normální velikost (obvod hlavy 30 - 38 cm)
900643	PREM - Nedonošenecká velikost (obvod hlavy 24 – 33 cm)
900644	MICRO - Velikost mikro (obvod hlavy 20 – 28 cm)

Zvolte velikost čelenky Biliband odpovídající obvodu hlavy dítěte.

- 1) Umístěte oční polštářky přes oči.
- 2) Horní fixační pásek umístěte na čelo dítěte.
- 3) Fixační pásy vedte okolo hlavy dítěte dozadu až za a pod výstupek na hlavě, kde je spojte suchým zipem tak, aby byly přesně proti pásku na čele.
- 4) Spojte konce se suchým zipem. (Připomínka: nemusí být příliš těsné.)
- 5) Čelenku vyměňte pokud se vytáhne a ztratí svoji pružnost.
- 6) Po připevnění čelenky můžete její polohu upravit pomocí půlkulatých výčnělků.

Upozornění

- Vyhněte se tlaku na nos a pravidelně kontrolujte, zda tato situace nenastala.
- Čelenka Biliband by neměla být pevně napnutá. Měla by pohodlně obepínat hlavu dítěte.

Distribuce:

Natus Medical Inc.
1501 Industrial Road
San Carlos, CA 94070 USA
+1 650-802-0400
www.natus.com

Zástupce pro ČR:

DARTIN, spol. s r. o.
Suchdolská 688
252 62 Horoměřice

Tel./fax: 241 470 361
261 216 076

E-mail: info@dartin.cz
Http:// www.dartin.cz

Vyrobeno:

Nascor Pty Ltd in Australia