



BQ70

novorozenecký
resuscitační systém

Comen BQ70

Integrovaný resuscitační systém pro použití s konvenčním resuscitačním okruhem (T-kus) nebo s okruhem Inspire rPAP



Optimalizovaná resuscitace s integrovaným systémem

Comen BQ70 - přenosný resuscitační systém pro bezpečnou a efektivní resuscitaci. Umožňuje odsávání dýchacích cest, aktivní prodýchání s T-resuscitátorem, případně unikátním systémem Inspire rPAP pro nasální resuscitaci, nebo jen podávání kyslíku. BQ70 to vše kombinuje do jediného celku.

Bezpečná a jemná ventilace je klíčová během stabilizace a resuscitace novorozenců. BQ70 disponuje vícestupňovou regulací inspiračního tlaku - PIP, umožňuje rychlé nastavení koncentrace kyslíku mezi 21 a 100 % a má odsávací jednotku s neonatálním rozsahem podtlaku.

Druhý regulovatelný výstup průtoku lze použít pro jednoduchou kyslíkovou terapii, k „napájení“ ručního vaku kyslíkem nebo pro Inspire rPAP^z okruh k nasální stabilizaci a resuscitaci s výrazně nižší dechovou prací.

3 funkce v jednom

Plná integrace odsávačky, T-resuscitátoru a sekundárního zdroje průtoku. BQ70 umožňuje resuscitaci v souladu s doporučením ILCOR. Vše v jednom přístroji s jednoduchým ovládáním

Přenosný

S nízkou hmotností a kompaktními rozměry lze resuscitační systém BQ70 snadno přemísťovat. Může být postaven na polici, nebo uchycen na mobilní stojan či tyče různých průměrů



Spolehlivé řízení tlaku

Vícestupňové limitování inspiračního tlaku zabezpečuje, že předem nastavené hodnoty zůstávají stabilní během celé doby resuscitace bez ohledu na změny ve stavu plic novorozence

Základní parametry

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Rozměry | 27,2 cm x 16,7 cm x 33,6 cm |
| Hmotnost | 4,9 kg |
| Odsávačka - rozsah podtlaku | -150 - 0 kPa |
| Kyslíková koncentrace | 21 - 100 % |
| Průtok 1 - resuscitační okruh | 0 - 15 l/min. |
| Průtok 2 - sekundární / rPAP | 0 - 15 l/min. |
| PIP 1 - rozsah nastavení | 0 - 30 kPa |
| PIP 2 - překročení limitu | 30 - 45 kPa |



Příslušenství:

- Jednorázový okruh s T-kusem a PEEP-ventilem
- Neonatální masky velikostí 0 a 1
- Inspire rPAP aplikátor s okruhem
- Inspire rPAP nostrilky S, M a L
- Testovací plíce pro přednastavení tlaků
- Mobilní stojan s košem



DARTIN

DARTIN spol. s r. o.
Suchbátská 688
252 62 Horoměřice
Tel.: 241 470 361, 734 155 235
URL: <http://www.dartin.cz>
e-mail: info@dartin.cz

COMEN

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.
No. 2 of FIYTE Timepiece Building, Nanhuan Avenue
Gongming Sub-district, Guangming New District, Shenzhen, P.R. China
Phone: +86 755 2640 8879 Fax: +86 755 2643 1232
URL: <http://www.en.comen.com>
e-mail: info@szcomen.com